

Formalintec

УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ



ПЕРНЕОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И
СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ ФОРМАЛЬДЕГИДА



Установка для дезинфекции формальдегидом


Предназначена для дезинфекции/ стерилизации формальдегидом с последующей нейтрализацией остаточного дезинфектанта. Корпус из нержавеющей стали,

установлен на колесиках для удобства передвижения. Отдельные резервуары для аммиака и раствора формальдегида. Светящийся индикатор низкого уровня жидкости в резервуаре. Таймер для установки продолжительности обработки формальдегидом. Отдельные кнопки регулировки температуры в каждом резервуаре. В комплект входят воронки для наполнения и ручка для переноски. Выпускается в двух вариантах: тип 250 для дезинфекции помещений от 100 до 2500 м³ и стерилизации помещений от 10 до 250 м³ и тип 500 для дезинфекции помещений от 50 до 5000 м³ и стерилизации помещений от 50 до 500 м³. Питание: 220 В, 50 Гц.


1. Вычислите общий объем.
2. Закройте окна и двери.
3. Убедитесь, что в помещении не осталось людей и животных.
4. Заполните резервуары для формальдегида и аммиака.
5. Установите таймер.
6. Поставьте установку в центр помещения.
7. Нажмите кнопку запуска и покиньте помещение.
8. Помещение будет продезинфицировано газообразным формальдегидом, после чего остаточный формальдегид нейтрализуется аммиаком.



Close windows

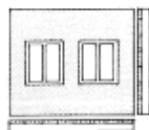

Calculate the total volume

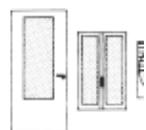


2 Close doors and windows




3 Move staff and animals out of room




4 Fill formaldehyde and ammonia tanks

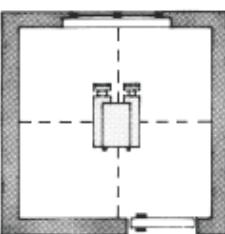


5 Program the timer

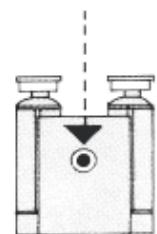

6 Put the unit in the centre of the room

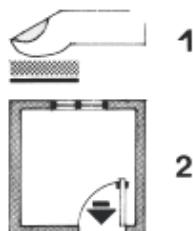

7 Push the start switch and leave the room

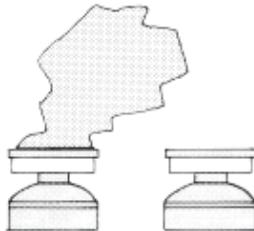

8 Formaldehyde will disinfect the room and the ammonia will neutralize the formaldehyde

ЗАКАЗ

КАТ. №	ОПИСАНИЕ
2252	Тип 250 - общие габариты 450x200x500 мм, вес 9.5 кг, 100 вт
2254	Тип 500 - общие габариты 580x220x500 мм, вес 12 кг, 1500 вт.